



Stick & Stop



Antirutschgitter

**GERUTSCHT  
WIRD AM  
SPIELPLATZ**



# Stick & Stop Pad

Antirutschgitter

## Sicherheit und Entlastung für Patienten

Mit dem neuen HSO Stick & Stop Pad wurde ein Antirutschgitter entwickelt, das Patienten beim Aufrichten im Spitalsbett unterstützt. Wegrutschen wird damit verhindert.

Wer sich nach einer Operation erstmals aufrichten möchte bzw. krankheits- oder altersbedingt nicht mehr ausreichend Kraft dazu hat, sich in eine aufrechte Position zu bringen, findet mit dem HSO Stick & Stop Pad die perfekte Lösung. Simplex in der Anwendung und gleichzeitig enorm hilfreich.


Leintücher bieten keine entsprechende Reibungsfläche für ein sicheres & stabiles Aufrichten. Das Pflegepersonal positioniert somit das HSO Stick & Stop Pad an jener Stelle, an der der Patient ohne diese Hilfestellung wegrutschen würde.

Ist der Patient bereits mobil, so kann man das Stick & Stop auch als Antirutschhilfe in Lehn- oder Rollstuhl verwenden.

## Bestelloptionen

<b>Produkt</b>	<b>Versandeinheit</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
Einteilig, gelb	50 Stück	HSOMATTE01

## ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

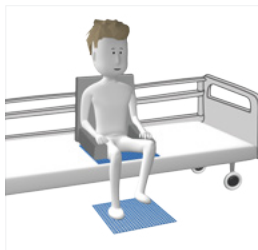

1

### Als Antirutschunterlage im und am Bett

TIPP

Platzieren Sie Stick & Stop unter dem Gesäß des Patienten, in Verbindung mit einem Querbettsessel hat er eine sichere Sitzposition.  
Am Boden direkt vor dem Bett erleichtert Stick & Stop das Aufstehen.



2

### Als Antirutschunterlage im Lehnstuhl

TIPP

Auch mit Leintuch kombinierbar, platzieren Sie je ein Stick & Stop unter und über dem Leintuch.



3

### Als Antirutschunterlage im Rollstuhl

TIPP

In Verbindung mit ThoraXsafe dient Stick & Stop besseren der Stabilisierung.

[www.hso-solutions.at](http://www.hso-solutions.at)

Richten Sie Ihre Fragen gerne direkt  
an Ihren persönlichen Produktspezialisten:



**VERTRIEB**

Rudolf Heintel Gesellschaft m.b.H.  
Erdbergstraße 166  
1030 Wien, Österreich

T +43 (1) 403 89 56-0  
F +43 (1) 403 89 56-50  
medizintechnik@heintel.at  
www.heintel.at

Foto:  
© IStock Photo skynesher  
© IStock Photo nuiiun

Druck- & Satzfehler vorbehalten  
Version 1.1 | Stand: Feb 2019